



INSTRUÇÕES DE USO

Produto: Máscara Descartável MEDpack

Máscara Descartável MEDpack Com tiras

Máscara Descartável MEDpack Infantil

Descrição: Não tóxica; 100% propileno; Uso único; Tripla Proteção; com filtro bacteriano.

Cores: Branca, Preto, Rosa, Azul, Vermelho, Verde, Amarelo e Estampado.

Composição: Possui 2 camadas externas de TNT (tecido-não- tecido) 15g/m²+ 1 camada interna de filtro de retenção bacteriana, soldadas tecnologicamente por ultrassom.

Indicação de uso: Utilizada para proteção, de uso único e individual.

Modo de Uso:

- Antes de tocar na máscara, limpe as mãos com um higienizador à base de álcool ou água e sabão.
- Pegue a máscara e verifique qual é o lado superior (onde está a tira de metal);
- Assegure-se que o lado correto da máscara está voltado para fora e coloque-a no seu rosto;
- Aperte a tira de metal da máscara (clip Nasal) para que ela se adapte ao formato do seu nariz;
- Puxe a parte inferior da máscara para que ela cubra sua boca e seu queixo;
- Encaixe o elástico na orelha para minimizar o espaço vazio entre o rosto e a máscara ou amarre as tiras por trás da cabeça de forma que fique firme.

Advertências e precauções:

- Enquanto estiver usando, evite tocar na máscara.
- Após o uso, retire a máscara sem tocar na frente. Descarte numa lixeira fechada imediatamente após o uso.
- Fabricante recomenda uso único.
- Se a máscara fica úmida, substitua por uma nova máscara limpa e seca.
- Não reutilize. A máscara é descartável.
- Higienize as mãos depois de tocar ou descartar a máscara. Use um higienizador de mãos à base de álcool ou, se estiverem sujas, lave as mãos com água e sabão.

Fabricado e Distribuído por:

Medevice do Brasil Comercial LTDA

CNPJ: 04.656.809/0001-27

Avenida da Recuperação nº 5803, rodovia BR-101 norte, km 58,5, galpão A- Guabiraba, Recife/PE.

Nº Registro ANVISA: 80217230009

Prazo de Validade: 5 anos

Responsável Técnica: Taynara Soares Nº CRF/PE: 8664