

	<b>FORMULÁRIO</b>	F-PGQ-058-A
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Versão: 03 Data de Emissão: 21/02/24 Pág: 1 de 2

## ATADURA DE CREPOM VANESSA PREMIUM

**Nome Técnico:** Ataduras

**Nome Comercial:** Atadura de Crepom Vanessa Premium

**Cadastro na ANVISA:** 81481900019



### 1- Descrição do Produto

- Tecido 100% algodão com fios de alta torção que confere a alta resistência. Apresenta-se não estéril e enrolada em si mesma, com largura e comprimento pré-determinados.
- O tecido de algodão com densidade de fios por cm<sup>2</sup> que confere o poder da elasticidade do produto no sentido longitudinal.
- Embalada individualmente em filme de Polipropileno Biorientado (BOPP). Podem também serem embaladas individualmente em filme de plástico Bopp (polipropileno biorientado) coex 25 e acondicionadas em sacos plásticos contendo 06 ou 12 unidades.
- Produto fabricado no Brasil, com matéria-prima 100% brasileira.

### 2- Apresentação do Produto

- Embalagem com 01, 06 ou 12 unidades;
- Dimensões: 4 cm x 1,8 m; 6 cm x 1,8 m; 8 cm x 1,8 m; 10 cm x 1,8 m; 12 cm x 1,8 m; 15 cm x 1,8 m; 20 cm x 1,8 m; 25 cm x 1,8 m e 30 cm x 1,8 m.

### 3- Indicação de Uso/Finalidade

A Atadura de Crepom Vanessa Premium é indicada em rotinas de ortopedia, fixação de curativos, nas atividades esportivas para imobilização de membros, na prevenção às contusões, em terapias compressivas e usos similares de compressão.

### 4- Instrução de Uso

- Escolher o modelo de acordo com o uso pretendido;
- Retirar a atadura da sua embalagem e envolver a região a ser comprimida até o total comprimento da atadura;
- Aplicar a atadura de forma a não deixar pregas ou rugas;
- Não exercer força na hora da aplicação e nem fazer grande compressão no membro a que foi aplicada, para evitar problemas circulatórios.

### 5- Armazenamento e Transporte

Armazenar e transportar em local limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e luz solar. Não há faixas de temperatura e umidade determinadas para o armazenamento e transporte do produto. Sendo assim, o produto pode ser armazenado e transportado sem a necessidade de controle de temperatura e umidade, seguindo as recomendações citadas.

	<b>FORMULÁRIO</b>	F-PGQ-058-A Versão: 03
	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Data de Emissão: 21/02/24 Pág: 2 de 2

**Precauções, Restrições e Advertências**

- Validade: 5 anos a partir da data de fabricação, enquanto a embalagem não for danificada ou molhada.
- Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada.
- As ataduras devem ser justas, porém não apertadas de forma a não interferir na circulação sanguínea. Deve-se afrouxar a atadura se ocorrer inchaço, manchas, sensação de frio, entorpecimento ou formigamento da área a ser tratada.
- Recomenda-se o uso por pessoas habilitadas das áreas de ortopedia e fisioterapia.
- O fabricante recomenda o uso único.
- Conservar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
- Após o uso descartar em local apropriado.

**Data da Aprovação:** 05/07/2024

---

Garantia da Qualidade

CÓPIA CONTROLADA