



INSTRUÇÃO DE USO AVENTAIS NÃO ESTÉREIS

EMIÇÃO: 26/10/2021

AVENTAIS NÃO ESTÉREIS

INSTRUÇÃO DE USO

1. INFORMAÇÕES DA EMPRESA

Produzido por: MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

Endereço: Rua Jorge Gama, Nº 101, Centro – CEP: 76.670.000 – Heitorai.

CNPJ: 06.107.711/0001-46 – Inscrição Estadual nº: 103698566

Fone: (62) 3251-0761

Home Page: www.maxdescarte.com.br

Autorização de Funcionamento Anvisa nº: 8.03.076-9

Responsável Técnico: André Luís de Paula Linhares CRO-GO 8841

1.1. Classe de enquadramento do produto

Os Aventais não estéreis é classificado como produto Classe II (médio risco), conforme RDC185/2001 - Registro de Produtos para Saúde.

1.1.1. Cadastro ANVISA – 80307690011

1.2. Apresentação do produto

1. Manga Longa - 40,50 e 60 g/m2 tamanhos Infantil, M e G;
2. Manga Curta - 40,50 e 60 g/m2 tamanho G;
3. Sem manga - 20 e 40 g/m2 tamanho Infantil e G;
4. Capa de capela - 50 g/m2 de tamanho único;
5. Espurgo - 50 g/m2 de tamanho único;
6. Prático - 20 g/m2 tamanho M

Os Aventais não estéreis são confeccionadas em TNT (Tecido Não Tecido), TNT Laminado (Tecido Não Tecido Laminado) e SMS (Spunbonded Meltblown Spunbonded) 100% Polipropileno. O produto é embalado em saco plástico contendo 10 unidades.

A embalagem primária consiste em saco plástico transparente (30x40 ou 35x50 cm com 0,03 micras), posteriormente, o produto é acondicionado em caixas de papelão (celulose), em quantidades variáveis, conforme pedido.

1.3. Indicação de uso

Os produtos da família avental são indicados para uso em ambiente odonto-médico-hospitalar, constituindo-se em uma barreira para proteger o corpo do profissional da saúde ou do paciente, contra possíveis contaminações por líquidos corpóreos ou substâncias contaminantes.

1.4. Modo de uso

- ✓ Abri-lo com movimentos firmes para que as dobraduras se desfaçam, tendo o cuidado de não o esbarrar em superfícies ou em pessoas da sala;
- ✓ Segurá-lo pela parte interna do ombro, afastando do corpo e, com movimentos ligeiros para cima, introduzir, ao mesmo tempo, os dois braços nas mangas, conservando-as em extensão para cima;
- ✓ Dar as costas para o circulante que está na sala, para que o mesmo faça o amarrilho das tiras do avental;



INSTRUÇÃO DE USO AVENTAIS NÃO ESTÉREIS

EMISSÃO: 26/10/2021

- ✓ Segurar o ombro direito soltando o avental com a mão esquerda, puxar o avental para baixo invertendo a manga para o avesso;
- ✓ Pegar o ombro esquerdo com a mão direita e remover o avental totalmente, puxando para fora.
- ✓ Após o término do procedimento, esse avental deverá ser imediatamente descartado como lixo infectante.

1.5. Condições de armazenamento

Armazenar em local limpo, seco, fresco, ao abrigo de luz solar e vapores químicos. Transportar na embalagem original. O descarte deve obedecer à Norma Regulamentadora vigente ou aos Procedimentos para destinação de lixo hospitalar.

1.6. Condições de transporte

- Não ultrapassar o limite de empilhamento da apresentação em caixa;
- Manter o produto posicionado na vertical, com os rótulos voltadas para cima;
- Transportar na embalagem original.

1.7. Contraindicações de uso

Este produto é contraindicado para pessoas que apresentam sensibilidade aos componentes da formulação.

1.8. Advertências

Produto descartável de uso único. Proibido reprocessar.

1.9. Precauções

Não utilize em caso de prazo de validade vencido e se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada.

1.10. Validade

Válido por 2 anos.

1.11. Descarte

O descarte do produto deve seguir um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, para manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme as diretrizes da RDC Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018 – que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências.

1.12. Reutilização

Produto descartável de uso único.