

	<b>FORMULÁRIO</b>	F-PGQ-064-A Versão: 03
	<b>INSTRUÇÃO DE USO</b>	Data de Emissão: 21/02/24 Pág: 1 de 2

## Compressa para Curativo Cirúrgico Estéril Luiza

### 1. Informações da Empresa

**Razão Social:** Amed S/A

**CNP:** 10.403.238/0001-11

**Endereço:** Rodovia BR 135 Km 628 + 930 m; S/N; Zona Rural; Curvelo/MG; CEP: 35.797-899

**AFE:** 8.14819.0

**Responsável Técnico:** Bárbara Pereira Mendes

### 2. Descrição do Produto

- Nome Técnico: Compressa para Curativo
- Nome Comercial: Compressa para Curativo Cirúrgico Estéril Luiza
- Notificação na ANVISA: 81481900010
- Composto por uma camada interna de manta de algodão hidrófilo envolta por tecido 100% algodão de baixa densidade de fios por centímetro, alvejado (isento de amido, corantes corretivos, alvejante óptico), inodoro e insípido. Apresenta-se estéril;
- Altamente absorventes;
- Camada interna 100% algodão hidrófilo;
- Embalados em envelopes de filme e PGC (papel grau cirúrgico).
- Esterilizado por óxido de etileno;
- Produto fabricado no Brasil, com matéria-prima 100% brasileira.

### 3. Apresentação do Produto

- Dimensões: 10 cm x 10 cm; 10 cm x 12 cm; 10 cm x 15 cm; 10 cm x 22 cm; 10 cm x 28 cm; 10 cm x 30 cm; 10 cm x 50 cm; 12 cm x 50 cm; 10 cm x 60 cm; 15 cm x 30 cm; 15 cm x 50 cm; 15 cm x 20 cm; 16 cm x 28 cm; 50 cm x 90 cm; 60 cm x 90 cm; 70 cm x 90 cm; 80 cm x 90 cm; 90 cm x 90 cm; 100 cm x 90 cm; 110 cm x 90 cm; 120 cm x 90 cm; 130 cm x 90 cm; 140 cm x 90 cm; 150 cm x 90 cm; 15 cm x 60 cm; 30 cm x 60 cm;
- Envelopes contendo 1 unidade.

### 4. Indicação de Uso/Finalidade

A Compressa para Curativo Cirúrgico Estéril Luiza é utilizada principalmente como curativo de diversas cirurgias com objetivo de proteger as cavidades cirúrgicas. É usado com êxito nas úlceras de pernas e escaras de decúbito, assim como, em curativos de queimaduras, amputação de membros e cirurgias plásticas.

### 5. Instrução de Uso

Abrir a embalagem através da técnica asséptica, para diminuir o risco de contaminação.

Retirar curativo cirúrgico da sua embalagem e aplicar sobre a área lesionada.

### 6. Armazenamento e Transporte

Armazenar e transportar em local limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e luz solar.

### 7. Precauções, Restrições e Advertências

- Validade: 5 anos a partir da data de fabricação, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada.
- Não utilizar se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada.
- Produto de uso único. Proibido reprocessar. Destruir após o uso.

	<b>FORMULÁRIO</b>	F-PGQ-064-A Versão: 03
	<b>INSTRUÇÃO DE USO</b>	Data de Emissão: 21/02/24 Pág: 2 de 2

- Conservar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.
- Após o uso descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

#### 8. Contraindicações

Não se aplica.

#### 9. Efeitos Adversos

Não se aplica.

**Data da Aprovação:** 21/02/2024

BARBARA PEREIRA  
MENDES:0894604  
0661

Assinado de forma digital  
por BARBARA PEREIRA  
MENDES:08946040661  
Dados: 2024.02.21 16:28:17  
-03'00'

Garantia da Qualidade

CÓPIA CONTROLADA