



FICHA TÉCNICA FRALDA GERIÁTRICA CONFORT CARE

DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO:

FRALDA GERIÁTRICA UNISSEX, ATÓXICA, DE USO EXTERNO, COMPOSTA POR FIBRAS DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO, FIOS DE ELÁSTICOS, POLÍMERO SUPER ABSORVENTES (GEL), ADESIVO A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA E FITAS ADESIVAS.

ULTRA GEL ABSORVENTE

TESTADO DERMATOLOGICAMENTE

HIPOALERGÊNICO

INCONTINÊNCIA MODERADA



INDICAÇÕES :

**USO ADULTO
PÓS PARTO
PÓS OPERATORIO
INCONTINÊNCIA**

ESPECIFICAÇÕES:

TAMANHO	CINTURA	PESO
P	40 á 90 cm	20 á 40 kg
M	70 á 115 cm	40 á 70 kg
G	90 á 130 cm	70 á 90 kg
GG	115 á 150 cm	Acima de 90 kg

INSTRUÇÕES DE USO

PESSOA EM PÉ:

1. POSICIONE A FRALDA ENTRE AS PERNAS, COM A PARTE MACIA JUNTO A PELE.
2. COLOQUE A PARTE COM FITAS ADESIVAS PARA TRÁS, POUCO MAIS ALTA QUE A PARTE DA FRENTE.
3. ALINHE A PARTE CENTRAL DA FRALDA NA VIRILHA, ESTENDENDO A PARTE FRONTAL SOBRE A BARRIGA, SOBREPONDO A PARTE DE TRÁS SOBRE A PARTE DA FRENTE.
4. USE AS FITAS REPOSICIONÁVEIS PARA FIXAR A FRALDA, INICIANDO PELAS PARTES INFERIORES.

PESSOA DEITADA:

1. POSICIONE A PESSOA TOTALMENTE DE LADO, E COLOQUE A FRALDA ABERTA POR BAIXO DO CORPO, DE MANEIRA QUE AS ABAS COM AS FITAS ADESIVAS FIQUEM NAS COSTAS.
2. REPOSICIONE O CORPO DA PESSOA NA POSIÇÃO INICIAL.
3. ALINHA A PARTE CENTRAL DA FRALDA NA VIRILHA, ESTENDENDO A PARTE FRONTAL SOBRE A BARRIGA SOBREPONDO A PARTE DE TRÁS SOBRE A PARTE DA FRENTE.
4. USE AS FITAS PARA FIXAR A FRALDA, INICIANDO PELAS FITAS INFERIORES.



PARA DESCARTA A FRALDA :

ENROLE A FRALDA, COMERÇANDO PELA PARTE DA FRENTE;
PRENDA COM AS FITAS ADESIVAS;
JOGUE A FRALDA USADA NO LIXO, NUNCA NO VASO SANITÁRIO.

IMPORTANTE

OS COMPONENTES DESTES PRODUTOS SÃO ATÓXICOS E NÃO CAUSAM ALERGIA.

EVITE O CONTATO DAS FITAS ADESIVAS COM POMADA, OLÉOS OU TALCOS PARA QUE NÃO PERCAM A ADERÊNCIA.

MANTENHA A EMBALAGEM FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO, E COM A EMBALAGEM FECHADA.

A VIDA ÚTIL É DE 03 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.

LAUDOS

HRIPT - AVALIAÇÃO DERMATOLÓGICA DA IRRITABILIDADE DÉRMICA
(EXAME TOXICOLÓGICO)

PRIMÁRIA - AII-S-RIPT-063362-01-04-18

ACUMULADA - AII-S-RIPT-063362-01-04-18

SENSIBILIZAÇÃO - AII-S-RIPT-063362-01-04-18

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS - Dos-18/1278.V00.02