





INSTRUÇÕES DE USO:

- 1 Abra a embalagem de modo asséptico;
- Retirar o dispositivo do involucro protetor, retirar a tampa protetora do conector luer;
 Adaptar o conector luer slip ou luer lock ao dispositivo de punção venosa;
- Fechar a torneira girando o primeiro manipulo giratório próximo ao dispositivo de punção venosa, direcionando o lado sem seta;
- 6 Retirar a tampa protetora de um dos conectores luer;
- 6 Conectar o equipo ou seringa com o medicamento no conector luer;
- Abrir a torneira descartável girando o manípulo giratório, direcionando uma das setas para o conector e outra para o dispositivo de punção venosa;
- 8 Administrar o fluído desejado e avaliar a eficácia da infusão

Torneirinha Três Vias

LUER LOCK

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:
UNIDADE IMPORTADORA:
EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.
RODOVIA ANTÔNIO HEIL, N°620, PARTE A32, KM 6, GALPÃO 01,
MÓDULOS 1 E 2, BAIRRO ITAIPAVA, ITAJAÍ/SC, BRASIL. CEP 88.316-000
CNPJ: 30.518.247/0002-46 El: 261661809

MATRIZ: EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. RUA GENERAL CÂMARA N° 82. IBURA, RECIFE-PE, BRASIL, CEP 51:190-737 CNRJ: 30.518.247/0001-65 IE: 077422902.

VALIDADE DO PRODUTO: 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO.

RESPONSÁVEL TÉCNICA: LUCIANA FREIRE GOMES BEZERRA CRF-PE 3646 REGISTRO ANVISA M/S: 81788089014



Sac: **81 3090.2800**

LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO / ESTERILIZAÇÃO

50 UNIDADES