



**INSTRUÇÃO DE USO
BIOFRASCO-NUTRI - FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL**

**Página
1/1**

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

O material empregado na fabricação dos frascos e tampas para o Biofrasco-Nutri - Frasco para Nutrição Enteral é o polietileno. Os frascos possuem graduação de 10 em 10mL, facilitando na utilização de pequenos volumes ou de acordo com a necessidade e individualidade do paciente, possuindo apresentações de frascos de 100mL, 300mL e 500mL. As tampas possuem membranas perfuráveis, adaptáveis aos equipos de nutrição enteral. O produto é embalado em embalagem BOPP (polipropileno biorientado), contendo uma unidade do produto por embalagem. A embalagem de embarque é confeccionada em papelão. Sua validade é de 05 (cinco) anos a partir da data de fabricação.

INDICAÇÃO/FINALIDADE:

Biofrasco-Nutri - Frasco para Nutrição Enteral é indicado para administração de nutrição enteral.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO/ CONSERVAÇÃO :

Conservar o produto em local limpo, seco e ao abrigo da luz solar e entre temperatura de 15 a 35°C. O empilhamento máximo deve ser de 08 caixas.

INSTRUÇÕES PARA USO DO PRODUTO:

- Abrir a embalagem com as mãos devidamente higienizadas;
- Retirar a tampa do Biofrasco-Nutri;
- Envasar a nutrição enteral a ser administrada;
- Fechar a tampa até que enrosque na base do bico do frasco;
- Administrar a nutrição enteral, conforme procedimentos médicos;
- Após administração, descartar o frasco.

PRECAUÇÕES DE USO/ RESTRIÇÕES DE USO:

Caso a embalagem esteja danificada e ou seu prazo de validade esteja vencido, não utilizar o produto.

ADVERTÊNCIAS:

Caso a embalagem esteja danificada e ou seu prazo de validade esteja vencido, não utilizar o produto.

CONTRA-INDICAÇÕES E EFEITOS ADVERSOS:

O produto não apresenta efeitos colaterais, desde que seja utilizado corretamente de acordo com a finalidade e instruções de uso.

ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR- DESTRUIR APÓS O USO – USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR

MS: 80212349002

RESPONSÁVEL TÉCNICA: FABRICIA MARZANO BERALDO - CRF/MG 23.872

FABRICADO POR:

BIOBASE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua dos Oitis, nº80 – Bairro Distrito Industrial - CEP: 37.556-836 – Pouso Alegre – MG.

CNPJ: 05.216.859/0001-56 – TEL:(35) 3427-7000

Informações, dúvidas, críticas e/ou sugestões; entrar em contato com o SAC Biobase:

Fone/Fax: (35) 3427-7029

E-mail: qualidade2@biobase.ind.br

AUT.FUNC.ANVISA/MS nº 802123-4.