

Atadura Crepom Não Estéril

Registro MS (Ministério da Saúde): 81648610003

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dados do Fabricante: | Razão Social: Anápolis Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares LTDA Nome Fantasia: Anápolis Indústria Hospitalar CNPJ: 28.415.097/0001-12 |
| Nome do Produto: | Atadura Crepom Não Estéril |
| Indicação de Uso: | Indicado para terapia compressiva, imobilizações, fixação de curativos, na prevenção contra contusões em atividades esportivas, bem como para curativos em geral nos hospitais, ambulatórios e prontos-socorros. |
| Modo de Uso: | Utilize a atadura de largura correta para o ferimento - diferentes partes do corpo precisam de diferentes larguras de ataduras. Evite cobrir os dedos das mãos ou dos pés ao enfaixar, dessa forma você consegue verificar facilmente a circulação. Aplique a bandagem com firmeza, mas cuidado para não apertar demais, prenda a ponta da atadura com uma fita micro porosa ou esparadrapo. Após a finalização do curativo pergunte ao paciente se está muito apertado e verifique como está a circulação do sangue no local, você pode pressionar uma unha ou um pedaço de pele até que fique pálido, se a cor da pele não retornar imediatamente, o curativo pode estar muito apertado, se esse for o caso você deve refazer o procedimento de forma que não fique apertado demais. |