

ARTIGO ORTOPÉDICO MOLDÁVEL POLAR FIX

Modelo Comercial: 6cm x 2m; 6cm x 3m; 6cm x 4m; 8cm x 2m; 8cm x 3m; 8cm x 4m;
10cm x 3m; 10cm x 4m; 10cm x 4.5m; 10cm x 5m; 12cm x 3m; 12cm X 4.5m; 12cm x 5m
15cm x 3m; 15cm x 4m; 15cm x 4.5m; 15cm x 5m; 20cm x 3m; 20cm x 4m; 20cm x 4.5m
20cm x 5m

Opções com embalagem biodegradável.

Indicação de uso: O Artigo Ortopédico Moldável Polar Fix é indicado para qualquer tipo e tamanho de imobilização, onde a fixação rápida é fundamental, como por exemplo: Fraturas ósseas - Lesões musculares - Correções - Terapias e etc.

Modo de uso:

O produto deve ser utilizado por profissional da área capacitado.

Advertências / Precauções:

Art. Ortop. Mold. 20cm x 4m: Deve ser imerso em água à temperatura ambiente, durante 5 segundos. Após imersão tire o excesso de água pelas extremidades. Jamais torcer o artigo. Tempo de imersão acima de 5 segundos acarreta maior tempo de secagem e redução da resistência do aparelho ortopédico moldável.

Demais apresentações: Deve ser imerso em água à temperatura ambiente, durante 3 segundos. Após imersão tire o excesso de água pelas extremidades. Jamais torcer o artigo. Tempo de imersão acima de 3 segundos acarreta maior tempo de secagem e redução da resistência do aparelho ortopédico moldável.

Condições de armazenamento / manuseio: manter o produto em local seco e limpo.

Transporte sem atrito

Número Anvisa: 8003400035

Validade:

04 anos

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Rua Ruzzi, 607 – Bairro Sertãozinho – Mauá/SP

CEP: 09370-850 – CNPJ: 02.881.877/0001-64 - Indústria Brasileira

Responsável Técnica: Nathalia da Costa Lima Teixeira - CRF/SP:

76.111

Atendimento ao consumidor: 0800191099 – sac@polarfix.com.br

www.polarfix.com.br

